



EGZAMIN ZAWODOWY Rok 2024 ZASADY OCENIANIA

**Arkusz zawiera informacje prawnie chronione
do momentu rozpoczęcia egzaminu**

Nazwa kwalifikacji: **Wykonywanie dekontaminacji sprzętu i wyrobów medycznych**
Oznaczenie arkusza: **MED.12-02-24.06-SG**
Symbol kwalifikacji: **MED.12**
Numer zadania: **02**
Wersja arkusza: **SG**

**PODSTAWA PROGRAMOWA
2019**

Wypełnia egzaminator

Kod ośrodka

 -

Kod egzaminatora

Data egzaminu

Dzień Miesiąc Rok

Godzina rozpoczęcia egzaminu

 :

Numer PESEL zdającego*										Numer stanowiska	

* w przypadku braku numeru *PESEL* – seria i numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość

Egzaminatorze!

- Oceniaj prace zdających rzetelnie i z zaangażowaniem. Dokumentuj wyniki oceny.
- Stosuj przyjęte zasady oceniania w sposób obiektywny.
- Jeżeli zdający, wykonując zadanie egzaminacyjne, uzyskuje inne rezultaty albo pożądane rezultaty uzyskuje w inny sposób niż uwzględniony w zasadach oceniania lub przedstawia nietypowe rozwiązanie, ale zgodnie ze sztuką w zawodzie, to nadal oceniaj zgodnie z kryteriami zawartymi w zasadach oceniania. Informacje o tym, że zasady oceniania nie przewidują zaistniałej sytuacji, prześlij niezwłocznie w formie pisemnej notatki do Przewodniczącego Zespołu Egzaminacyjnego z prośbą o przekazanie jej do Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej. Notatka może być sporządzona odręcznie w trybie roboczym.
- Informuj przewodniczącego zespołu nadzorującego o wszystkich nieprawidłowościach zaistniałych w trakcie egzaminu, w tym w szczególności o naruszeniach przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy i o podejrzeniach niesamodzielności w wykonaniu zadania przez zdającego.

Numer
stanowiska

Egzaminator wpisuje **T**,
jeżeli zdający spełnił
kryterium albo **N**, jeżeli
nie spełnił

Elementy podlegające ocenie/kryteria oceny

Rezultat 1: Karta mycia i dezynfekcji chemiczno-termicznej

Wpisane w kolumnie:

1	A: zestaw histeroskopowy						
2	B: 55 °C/10 minut						
3	C: Wskaźnik Nr 1						

Rezultat 2: Karta mycia i dezynfekcji termicznej

Wpisane w kolumnie:

1	A: Nożyczki chirurgiczne; B: 4						
2	A: Igłotrzymacz; B: 3						
3	A: Pęseta chirurgiczna; B: 3						
4	A: Pęseta anatomiczna; B: 4						
5	D: 90 °C, 5 minut lub 90 °C/5 minut; E: TAK						

Rezultat 3: Protokół niezgodności

Wpisane:

1	Opis niezgodności: Nożyczki chirurgiczne - 1 szt. uszkodzone						
2	Opis niezgodności: Nożyczki chirurgiczne - 1 szt. jednorazowego użycia						
3	Opis niezgodności: Igłotrzymacz - 1 szt. uszkodzony						
4	Opis niezgodności: Pęseta chirurgiczna - 2 szt. jednorazowego użycia						

Numer
stanowiska

Rezultat 4: Karta procesów sterylizacji*Wpisane w kolumnie:*

1	A: Zestaw do zdejmowania szwów; B: 2						
2	A: Igłotrzymacz; B: 2						
3	A: Pęseta chirurgiczna; B: 1						
4	A: Pęseta anatomiczna; B: 2						
5	C: parą wodną; D: Wskaźnik Nr 8; E: Wskaźnik Nr 5; F: Wskaźnik Nr 6						

Rezultat 5: Etykieta roztworu środka dezynfekcyjnego*Wpisane:*

1	Nazwa środka dezynfekcyjnego: Viruzyme PCD						
2	Spektrum działania (wpisz symbole literowe): B; Tbc; F; V						
3	Skład roztworu - objętość wody: 2 985 ml						
4	Skład roztworu - objętość koncentratu środka dezynfekcyjnego: 15 ml						
5	Stężenie roztworu: 0,5%						
6	Czas dezynfekcji: 5 minut						

Numer
stanowiska

Przebieg 1: Wykonanie higienicznej dezynfekcji rąk techniką Ayliffe'a, przygotowanie 3 litrów roztworu środka dezynfekcyjnego Viruzyme PCD, wykonanie dezynfekcji i mycia Zestawu narzędzi I

Zdający zgłosi gotowość do wykonania zadania przez podniesienie ręki. Zadanie wykona w obecności egzaminatora.

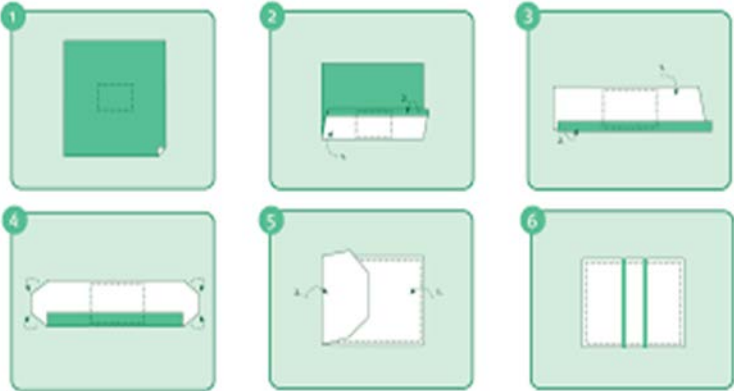
Zdający:

1	przystąpił do dezynfekcji rąk bez biżuterii, wykonał 6 etapów dezynfekcji rąk, powtarzając każdy etap minimum pięciokrotnie						
2	założył środki ochrony indywidualnej: czepek - zakrywając nim wszystkie włosy, maseczkę, okulary ochronne, fartuch flizelinowy, fartuch foliowy, rękawiczki						
3	wlał do wanienki dezynfekcyjnej 2 litry 985 mililitrów wody, następnie wlał 15 ml koncentratu						
4	zamieszał kilkakrotnie przygotowany roztwór przy użyciu mieszadła lub miarki						
5	wybrał z narzędzi uchwyt do skalpela, miskę nerkowatą metalową, kulociąg, łyżkę kostną, hak chirurgiczny Farabeuf, całkowicie zanurzył w roztworze Viruzyme PCD otwarty kulociąg i pozostałe narzędzia oraz miskę nerkowatą, zamknął wanienkę pokrywą <i>Egzaminator poinformuje zdających o wykonywaniu kolejnych czynności z pominięciem czasu dezynfekcji.</i>						
6	wyczyścił powierzchnie zewnętrzne i wewnętrzne czterech narzędzi i miski nerkowatej używając szczoteczki						
7	wypłukał wodą demineralizowaną cztery narzędzia i miskę nerkowatą, a następnie odłożył na tacę narzędziową						
8	wylał roztwór z wanienki dezynfekcyjnej, opłukał wanienkę pod bieżącą wodą, osuszył ją i zdezynfekował, nie pozostawił na blacie stołu rozlanego płynu, wyrzucił środki ochrony indywidualnej do pojemnika na odpady z czerwonym workiem						
9	wykonał 6 etapów dezynfekcji rąk, powtarzając każdy etap pięciokrotnie						

Numer
stanowiska

Przebieg 2: Przygotowanie do sterylizacji i pakowanie metodą równoległą Zestawu narzędzi I

Kontynuacja oceny przez Egzaminatora.

1	zdezynfekował blat roboczy chusteczką dezynfekcyjną przed przystąpieniem do przygotowania Zestawu narzędzi I do sterylizacji						
2	wykonał kontrolę czystości czterech sztuk narzędzi i miski nerkowatej pod lampą z soczewką powiększającą						
3	naniósł preparat konserwujący na przegub kulociągu, rozprowadził poprzez kilkakrotne otwieranie i zamykanie narzędzia						
4	włożył do Zestawu narzędzi I wskaźnik chemiczny typ 5						
5	ułożył miskę nerkowatą na tacy narzędziowej dnem do góry						
6	zapakował Zestaw narzędzi I na tacy narzędziowej w dwa niezależne arkusze włókniny sterylizacyjnej metodą równoległą						
7	zapakował zestaw narzędzi zgodnie ze schematem 						
8	zastosował do kontroli procesu na zewnętrznej warstwie pakietu taśmę wskaźnikową						
9	opisał pakiet na taśmie neutralnej: data sterylizacji DS (dd-mm-rrrr) - data egzaminu, data ważności DW (dd-mm-rrrr) - datę tydzień (7 dni) po dacie egzaminu, Blok Operacyjny						
10	uporządkował stanowisko pracy (nie pozostawił na blacie papieru, taśmy), wykonał dezynfekcję blatu roboczego za pomocą chusteczek do dezynfekcji powierzchni, chusteczki oraz czepek wyrzucił do pojemnika na odpady, zdezynfekował ręce						

Egzaminator

imię i nazwisko

.....

data i czytelny podpis