

**EGZAMIN ZAWODOWY
Rok 2023
ZASADY OCENIANIA**

**Arkusz zawiera informacje prawnie chronione
do momentu rozpoczęcia egzaminu**

Nazwa kwalifikacji: **Wykonywanie dekontaminacji sprzętu i wyrobów medycznych**
Oznaczenie arkusza: **MED.12-03-23.01-SG**
Oznaczenie kwalifikacji: **MED.12**
Numer zadania: **03**
Wersja arkusza: **SG**

**PODSTAWA PROGRAMOWA
2019**

Wypełnia egzaminator

Kod ośrodka -

Kod egzaminatora

Data egzaminu
Dzień Miesiąc Rok

Godzina rozpoczęcia egzaminu :

Numer PESEL zdającego*										Numer stanowiska	

* w przypadku braku numeru PESEL – seria i numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość

Egzaminatorze!

- Oceniaj prace zdających rzetelnie i z zaangażowaniem. Dokumentuj wyniki oceny.
- Stosuj przyjęte zasady oceniania w sposób obiektywny.
- Jeżeli zdający, wykonując zadanie egzaminacyjne, uzyskuje inne rezultaty albo pożądane rezultaty uzyskuje w inny sposób niż uwzględniony w zasadach oceniania lub przedstawia nietypowe rozwiązanie, ale zgodnie ze sztuką w zawodzie, to nadal oceniaj zgodnie z kryteriami zawartymi w zasadach oceniania. Informacje o tym, że zasady oceniania nie przewidują zaistniałej sytuacji, przełącz niezwłocznie w formie pisemnej notatki do Przewodniczącego Zespołu Egzaminacyjnego z prośbą o przekazanie jej do Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej. Notatka może być sporządzona odręcznie w trybie roboczym.
- Informuj przewodniczącego zespołu nadzorującego o wszystkich nieprawidłowościach zaistniałych w trakcie egzaminu, w tym w szczególności o naruszeniach przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy i o podejrzeniach niesamodzielności w wykonaniu zadania przez zdającego.

Numer
stanowiska

Elementy podlegające ocenie/kryteria ocenyEgzaminator wpisuje **T**,
jeżeli zdający spełnił
kryterium albo **N**, jeżeli
nie spełnił**Rezultat 1: Protokół odbiorczy**

Wpisane:

1	data - zgodna z datą egzaminu						
2	Nazwa wyrobu medycznego: wkręt kostny/implant Liczba sztuk: 20 Nazwa użytkownika: Sala Operacyjna Ortopedyczna						
3	Nazwa wyrobu medycznego: klem jelitowy Liczba sztuk: 2 Nazwa użytkownika: Sala Operacyjna Chirurgii Ogólnej						
4	Nazwa wyrobu medycznego: pęseta atraumatyczna Liczba sztuk: 1 Nazwa użytkownika: Sala Operacyjna Chirurgii Naczyniowej lub Sala Operacyjna Chirurgii Ogólnej						
5	Nazwa wyrobu medycznego: rozszerzadło Hegar Liczba sztuk: 10 Nazwa użytkownika: Sala Operacyjna Ginekologiczna						
6	Nazwa wyrobu medycznego: kateter uszny Hartmanna Liczba sztuk: 1 Nazwa użytkownika: Sala Operacyjna Laryngologiczna						
7	Nazwa wyrobu medycznego: kleszczyki biopsyjne Liczba sztuk: 4 Nazwa użytkownika: Pracownia Endoskopii						

Numer
stanowiska

Rezultat 2: Karta sterylizacji

Wpisane w kolumnie:

1	A: wkręt kostny, klem jelitowy, pęseta atraumatyczna, rozszerzadło Hegar, kateter uszny Hartmanna, kleszczyki biopsyjne						
2	B: dwie warstwy rękawa papierowo-foliowego/podwójny rękaw papierowo-foliowy						
3	C: Wskaźnik: wskaźnik do procedur badawczych/Bowie-Dick Typ: 2 Nr ilustracji: 5						
4	D: para wodna/ sterylizacja parowa temp. 134°C czas 7 min						
5	E: Wskaźnik: emulacyjny Typ: 6 Nr ilustracji: 8						
6	F: Wskaźnik: wieloparametrowy Typ: 4 Nr ilustracji: 10						
7	G: Nr ilustracji: 6						
8	H: 1 rok/12 miesięcy						

Numer
stanowiska

Rezultat 3: Karta przygotowania Zestawu nr 1 do sterylizacji*Dopuszcza się inne sformułowania, pod warunkiem poprawności merytorycznej i znaczeniowej.*

Wpisane w kolumnie:

1	A: nożyczki chirurgiczne, kleszczyki Pean, pęseta chirurgiczna								
2	dla nożyczek chirurgicznych: B: TAK, C: krawędzie tnące/część robocza, złącze/przegub/zawias/styki, ramiona <i>Kryterium należy uznać za spełnione, jeżeli zapisany jest co najmniej 1 obszar krytyczny.</i>								
3	dla kleszczyków Pean: B: TAK, C: powierzchnie rowkowane/część robocza, złącze/przegub/zawias <i>Kryterium należy uznać za spełnione, jeżeli zapisany jest co najmniej 1 obszar krytyczny.</i>								
4	dla pęsety chirurgicznej: B: TAK C: powierzchnie rowkowane/zębki/część robocza/szczęki, elementy sprężynujące <i>Kryterium należy uznać za spełnione, jeżeli zapisany jest co najmniej 1 obszar krytyczny.</i>								
5	dla nożyczek chirurgicznych: D: wpisane TAK E: przegub/zawias/złącze/styki, olej parafinowy								
6	dla kleszczyków Pean: D: wpisane TAK E: przegub/zawias/złącze, olej parafinowy								
7	F: TAK - dla nożyczek chirurgicznych								

Numer
stanowiska

Rezultat 4: Pakiet z zestawem nr 1

1	Zestaw nr 1 zapakowany jest w dwie warstwy rękawa papierowo-foliowego						
2	Części chwytne narzędzi ułożone są w pakiecie z zachowaniem kierunku otwierania dla obu warstw rękawa						
3	Ostrze nożyczek chirurgicznych zabezpieczone osłonką, pakiet bez plam olejowych						
4	Wewnątrz pakietu znajduje się wskaźnik wieloparametrowy						

Etykieta

5	Nazwa zestawu: Zestaw nr 1						
6	Skład zestawu: nożyczki chirurgiczne, kleszczyki Pean, pęseta chirurgiczna						
7	Użytkownik: Szpitalny Oddział Ratunkowy						
8	data sterylizacji - zgodna z datą egzaminu						
9	data ważności - 6 miesięcy od daty egzaminu						

Numer stanowiska							

Przebieg 1: Wykonanie dezynfekcji rąk według techniki Ayliffe'a i przygotowania pakietu z Zestawem nr 1 do sterylizacji							
<i>Zdający zgłosi gotowość przez podniesienie ręki.</i>							
Zdający:							
1	założył czepek ochronny zakrywając nim wszystkie włosy						
2	wykonał dezynfekcję rąk według techniki Ayliffe'a: środek dezynfekcyjny naniósł na suche dłonie, wykonał 6 etapów dezynfekcji rąk, powtórzył każdy z sześciu etapów minimum pięciokrotnie						
3	wybrał z zestawu narzędzi nożyczki chirurgiczne, kleszczyki Pean, pęsetę chirurgiczną, wykonał wzrokową kontrolę czystości pod lampą powiększającą						
4	naniósł środek do konserwacji w miejsca przegubów (złączy) nożyczek chirurgicznych i kleszczyków Pean						
5	rozprowadził środek do konserwacji wykonując ruchy zamknięcia i otwarcia ramion nożyczek chirurgicznych oraz kleszczyków Pean						
6	po konserwacji wykonał test funkcyjny nożyczek - sprawdził ostrość cięcia wykonując minimum 3 cięcia na kompresie gazowym						
7	wykonał test funkcyjny zgrzewarki, sprawdził wizualnie jakość zgrzewu						
8	umieścił trzy sztuki narzędzi w odciętym i zgrzanym z jednej strony rękawie papierowo-foliowym, zamknął pakiet zgrzewem						
9	przygotowany pakiet umieścił w szerszym rękawie papierowo-foliowym zgrzanym z jednej strony, zamknął pakiet zgrzewem						
10	po wykonaniu pakietu uporządkował stanowisko pracy, na blacie nie pozostawił odpadów z rękawa papierowo-foliowego, zużytych kompresów, wykonał dezynfekcję stanowiska chusteczkami nasączonymi środkiem dezynfekcyjnym, zdjęł czepek i wyrzucił do pojemnika na odpady						

Egzaminator

imię i nazwisko

.....

data i czytelny podpis