

Nazwa kwalifikacji: **Wykonywanie i naprawa wyrobów medycznych z zakresu protetyki dentystycznej, ortodoncji oraz epitezy twarzy**

Oznaczenie kwalifikacji: **MED.06**

Numer zadania: **01**

Wersja arkusza: **SG**

Wypełnia zdający

Numer PESEL zdającego*

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Miejsce na naklejkę z numerem
PESEL i z kodem ośrodka

Czas trwania egzaminu: **180** minut.

MED.06-01-22.01-SG

EGZAMIN ZAWODOWY

Rok 2022

CZĘŚĆ PRAKTYCZNA

**PODSTAWA PROGRAMOWA
2019**

Instrukcja dla zdającego

1. Na pierwszej stronie arkusza egzaminacyjnego wpisz w oznaczonym miejscu swój numer PESEL i naklej naklejkę z numerem PESEL i z kodem ośrodka.
2. Na KARCIE OCENY w oznaczonym miejscu przyklej naklejkę z numerem PESEL oraz wpisz:
 - swój numer PESEL*,
 - oznaczenie kwalifikacji,
 - numer zadania,
 - numer stanowiska.
3. KARTĘ OCENY przełącz zespołowi nadzorującemu.
4. Sprawdź, czy arkusz egzaminacyjny zawiera 4 strony i nie zawiera błędów. Ewentualny brak stron lub inne usterki zgłoś przez podniesienie ręki przewodniczącemu zespołu nadzorującego.
5. Zapoznaj się z treścią zadania oraz stanowiskiem egzaminacyjnym. Masz na to 10 minut. Czas ten nie jest wliczany do czasu trwania egzaminu.
6. Czas rozpoczęcia i zakończenia pracy zapisze w widocznym miejscu przewodniczący zespołu nadzorującego.
7. Wykonaj samodzielnie zadanie egzaminacyjne. Przestrzegaj zasad bezpieczeństwa i organizacji pracy.
8. Jeżeli w zadaniu egzaminacyjnym występuje polecenie „zgłoś gotowość do oceny przez podniesienie ręki”, to zastosuj się do polecenia i poczekaj na decyzję przewodniczącego zespołu nadzorującego.
9. Po zakończeniu wykonania zadania pozostaw rezultaty oraz arkusz egzaminacyjny na swoim stanowisku lub w miejscu wskazanym przez przewodniczącego zespołu nadzorującego.
10. Po uzyskaniu zgody zespołu nadzorującego możesz opuścić salę/miejsce przeprowadzania egzaminu.

Powodzenia!

* w przypadku braku numeru PESEL – seria i numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość

Zadanie egzaminacyjne

Obetnij podstawę otrzymanego modelu orientacyjnego szczęki na półokrągło, a następnie przygotuj go do wykonania łyżki indywidualnej.

Uwaga! *Gotowość do skorzystania z obcinarki zgłoś przez podniesienie kartki z informacją „OBCINARKA”. Twoja praca przy obcinarce nie powinna trwać dłużej niż 10 minut. Ukończenie przygotowania modelu do wykonania łyżki indywidualnej zgłoś do oceny przez podniesienie ręki.*

Wykonaj perforowaną łyżkę indywidualną z akrylu samopolimeryzującego, zgodnie z zaleceniami lekarza dentystry zawartymi w Karcie laboratoryjnej, technologią wykonawstwa ruchomych protez zębowych oraz instrukcją użytkowania otrzymanego materiału.

Gotową łyżkę indywidualną wraz z modelem orientacyjnym pozostaw na stanowisku egzaminacyjnym do oceny egzaminatora.

Podczas wykonywania zadania przestrzegaj zasad organizacji pracy, bhp, ochrony przeciwpożarowej oraz ochrony środowiska.

Zadanie wykonaj na stanowisku egzaminacyjnym, wyposażonym w niezbędne narzędzia i sprzęt.
Po wykonaniu zadania uporządkuj stanowisko pracy.

KARTA LABORATORYJNA**Nr pracy 18/2022****ZLECAJĄCY:**

Gabinet stomatologiczny „Art-Dent”
ul. Polańska 6
40-154 Babice

WYKONAWCA:

Pracownia protetyczna PRODENT
ul. Leśna 2
40-154 Babice

PACJENT:

Jolanta Dzika
ul. Gronowa 6
40-154 Babice

Zlecenie: Proteza całkowita górnaData przyjęcia: **12.01.2022 r.**Data oddania: **01.03.2022 r.****STAN UZĘBIENIA**

<u>17</u>	<u>16</u>	<u>15</u>	<u>14</u>	<u>13</u>	<u>12</u>	<u>11</u>	<u>21</u>	<u>22</u>	<u>23</u>	<u>24</u>	<u>25</u>	<u>26</u>	<u>27</u>
47	46	45	44	43	42	41	31	32	33	34	35	36	37

PLAN LECZENIA

DATA	POSTĘPOWANIE KLINICZNE	POSTĘPOWANIE LABORATORYJNE
12.01.2022 r.	<i>pobranie wycisku anatomicznego szczęki</i>	<i>sporządzenie modelu orientacyjnego szczęki i wykonanie indywidualnej łyżki wyciskowej</i>
22.01.2022 r.	<i>pobranie wycisku czynnościowego szczęki i wycisku zębów antagonistycznych</i>	

Proszę:

- zarysować ołówkiem kopiowym zasięg łyżki indywidualnej na modelu orientacyjnym, który od strony podniebiennej powinien kończyć się na tylnej granicy podniebienia twardego, a od strony przedsionkowej być oddalony na 1-2 mm od granicy ruchomej błony śluzowej, z ominięciem wędzidełka i przyczepów,
- zablokować podcięcie wyrostka zębodołowego,
- wykonać łyżkę indywidualną o zasięgu do narysowanej linii,
- umieścić uchwyt łyżki wzdłuż szwu podniebiennego od szczytu wyrostka do połowy długości podniebienia twardego,
- wykonać perforację łyżki na całym obszarze płyty,
- uformować uchwyt łyżki o wysokości około 1,5 cm.

lek. dent. Janusz Gojek

Czas przeznaczony na wykonanie zadania wynosi 180 minut.

Ocenie podlegać będą 2 rezultaty:

- model orientacyjny przygotowany do wykonania górnej łyżki indywidualnej,
- górna łyżka indywidualna

oraz

przebieg obcinania i przygotowania modelu orientacyjnego do wykonania górnej łyżki indywidualnej,
przygotowania masy akrylowej samopolimeryzującej i wykonania górnej łyżki indywidualnej.

www.EgzaminZawodowy.info

www.EgzaminZawodowy.info