

**EGZAMIN ZAWODOWY
Rok 2025
ZASADY OCENIANIA**

*Arkusz zawiera informacje prawnie chronione
do momentu rozpoczęcia egzaminu*

Nazwa kwalifikacji: **Wykonywanie dekontaminacji sprzętu i wyrobów medycznych**
Oznaczenie arkusza: **MED.12-03-25.01-SG**
Symbol kwalifikacji: **MED.12**
Numer zadania: **03**
Wersja arkusza: **SG**

**PODSTAWA PROGRAMOWA
2019**

Wypełnia egzaminator

Kod ośrodka -

Kod egzaminatora

Data egzaminu
Dzień Miesiąc Rok

Godzina rozpoczęcia egzaminu :

Numer PESEL zdającego*										Numer stanowiska	

* w przypadku braku numeru PESEL – seria i numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość

Egzaminatorze!

- Oceniaj prace zdających rzetelnie i z zaangażowaniem. Dokumentuj wyniki oceny.
- Stosuj przyjęte zasady oceniania w sposób obiektywny.
- Jeżeli zdający, wykonując zadanie egzaminacyjne, uzyskuje inne rezultaty albo pożądane rezultaty uzyskuje w inny sposób niż uwzględniony w zasadach oceniania lub przedstawia nietypowe rozwiązanie, ale zgodnie ze sztuką w zawodzie, to nadal oceniaj zgodnie z kryteriami zawartymi w zasadach oceniania. Informacje o tym, że zasady oceniania nie przewidują zaistniałej sytuacji, przełącz niezwłocznie w formie pisemnej notatki do Przewodniczącego Zespołu Egzaminacyjnego z prośbą o przekazanie jej do Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej. Notatka może być sporządzona odręcznie w trybie roboczym.
- Informuj przewodniczącego zespołu nadzorującego o wszystkich nieprawidłowościach zaistniałych w trakcie egzaminu, w tym w szczególności o naruszeniach przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy i o podejrzeniach niesamodzielności w wykonaniu zadania przez zdającego.

Numer
stanowiska

Egzaminator wpisuje **T**,
jeżeli zdający spełnił
kryterium albo **N**, jeżeli
nie spełnił

Elementy podlegające ocenie/kryteria oceny

Rezultat 1: Karta mycia i dezynfekcji termicznej

Wpisane:

1	Karta mycia i dezynfekcji termicznej z dnia: data egzaminu						
2	A: Zestaw do wenesekcji, B: 2						
3	A: Zestaw 5 sztuk osteotomów, B: 1						
4	A: Nożyczki chirurgiczne, B: 10						
5	A: Przewód z nożem do elektrokoagulacji, B: 6						
6	A: Przewód z elektrodą bipolarną, B: 3						
7	C: $A_0 \geq 6000$						
8	Kolumna D: TAK, test Nr 4 i/lub Nr 8						
9	Kolumna E: TAK, test Nr 5 i/lub Nr 7						

Rezultat 2: Karta mycia i dezynfekcji chemiczno-termicznej

Wpisane:

1	A: Układ rur oddechowych do respiratora, B: 5						
2	A: Światłowód, B: 5						
3	A: Maska anestezyjologiczna, B: 15						
4	C: TAK, test Nr 4 i/lub Nr 8						
5	D: NIE						

Numer
stanowiska

Rezultat 3: Protokół niezgodności

Wpisane:

1	A: Osteotom 10 mm B: 1, C: z zadziorami i wyszczerbieniami						
2	A: Nożyczki chirurgiczne, B: 3, C: tępe						
3	A: Światłowód, B: 2, C: plamy i zaciemnienia obrazu						
4	A: Maska anestetyczna B: 3, C: pęknięcia naprężeniowe na wymiennych łącznikach z polisulfonu						

Rezultat 4: Karta sterylizacji

Wpisane:

1	Parametry sterylizacji parowej: temp. 134 °C: czas: 7 minut						
2	Parametry sterylizacji tlenkiem etylenu: temp. 55 °C, czas 1 godz., degazacja: wymagana						
3	Kolumna A dla Nożyczek chirurgicznych: 7						
4	Kolumna A dla Maski anestetycznej: 12						
5	Kolumna B dla Zestawu do wenesekcji, Zestawu 5 sztuk osteotomów, Nożyczek chirurgicznych, Przewodu z nożem do elektrokoagulacji, Przewodu z elektrodą bipolarną: TAK , pozostałe: nie dotyczy						
6	Kolumna C dla Układu rur oddechowych, Światłowodu, Maski anestetycznej, Opaski uciskowej, Zgłębnika: TAK , pozostałe: nie dotyczy						

Numer
stanowiska

Rezultat 5: Pakiet z Zestawem do zmiany opatrunku

Egzaminator oceniając: R.5.4 korzysta z linijki, która znajduje się na stanowisku kontroli, składania i pakowania wyrobów medycznych, oceniając: R.5.1, R.5.2, R.5.5 może otworzyć pakiet

1	Wewnątrz pakietu znajdują się: kleszczyki okienkowe 1 szt., pęseta chirurgiczna 1 szt., 1 szt., kleszczyki Pean 1 szt., nożyczki chirurgiczne 1 szt.						
2	Uchwyty narzędzi: kleszczyków okienkowych 1 szt., pęsety chirurgicznej 1 szt., kleszczyków Pean 1 szt., nożyczek chirurgicznych 1 szt. skierowane są w kierunku otwierania pakietu i nożyczki chirurgiczne są zabezpieczone osłonką						
3	Zgrzewy pakietu są ciągle na całej szerokości, bez kanałów, pęcherzyków powietrza i rys						
4	Odległość pomiędzy końcem pakietu a zgrzewem od strony otwarcia ma co najmniej 2 cm						
5	Wewnątrz pakietu znajduje się wskaźnik chemiczny typu 4						
6	Pakiet opisany datą sterylizacji pakietu: data egzaminu w formacie dd-mm-rrrr						
7	Pakiet opisany datą ważności pakietu: data o 5 miesięcy późniejsza od daty egzaminu (+/- 2 dni) w formacie dd-mm-rrrr						
8	Pakiet opisany poza przestrzenią pakowania						
9	Na pakiecie nie ma plam po preparacie konserwującym						

Numer stanowiska							

Przebieg 1: Wykonanie higienicznej dezynfekcji rąk techniką Ayliffe'a, kompletowanie i przygotowanie, zgodnie z procedurami do sterylizacji pakietu z Zestawem do zmiany opatrunku

Zdający:

1	założył czepek, zakrywając nim wszystkie włosy, przystąpił do dezynfekcji rąk bez biżuterii (zegarka, bransoletki, obrączki, pierścionków)						
2	wykonał 6 etapów dezynfekcji rąk, powtarzając każdy etap pięciokrotnie, w jednym z etapów pocierał wewnętrzne części dłoni z przeplecionymi palcami						
3	skontrolował czystość narzędzi wchodzących w skład Zestawu do zmiany opatrunku: kleszczyków okienkowych 1 szt., pęsety chirurgicznej 1 szt., kleszczyków Pean 1 szt., nożyczek chirurgicznych 1 szt. pod lampą z lupą i podświetleniem						
4	naniósł olej do konserwacji na przeguby kleszczyków okienkowych, kleszczyków Pean oraz nożyczek chirurgicznych						
5	po naniesieniu oleju wykonał narzędziem kilkukrotne ruchy zamykania i otwierania						
6	wykonał test cięcia nożyczek chirurgicznych, wykonując 3 niezależne nacięcia na kompresie gazowym						
7	uporządkował stanowisko pracy (nie pozostawił na blacie resztek rękawa papierowo-foliowego, papieru), wykonał dezynfekcję blatu stanowiska do przeglądu, konserwacji narzędzi i pakowania narzędzi zabiegowych za pomocą chusteczki dezynfekcyjnej, chusteczkę wyrzucił do kosza na odpady						
8	zjął czepek i wyrzucił do kosza na odpady medyczne						

Egzaminator

imię i nazwisko

.....

data i czytelny podpis