

**EGZAMIN ZAWODOWY
Rok 2021
ZASADY OCENIANIA**

*Arkusz zawiera informacje prawnie chronione
do momentu rozpoczęcia egzaminu*

Nazwa kwalifikacji: **Wykonywanie dekontaminacji sprzętu i wyrobów medycznych**
Oznaczenie arkusza: **MED.12-03-21.06-SG**
Oznaczenie kwalifikacji: **MED.12**
Numer zadania: **03**
Wersja arkusza: **SG**

**PODSTAWA PROGRAMOWA
2019**

Wypełnia egzaminator

Kod ośrodka -

Kod egzaminatora

Data egzaminu
Dzień Miesiąc Rok

Godzina rozpoczęcia egzaminu :

Numer PESEL zdającego*										Numer stanowiska	

* w przypadku braku numeru PESEL – seria i numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość

Egzaminatorze!

- Oceniaj prace zdających rzetelnie i z zaangażowaniem. Dokumentuj wyniki oceny.
- Stosuj przyjęte zasady oceniania w sposób obiektywny.
- Jeżeli zdający, wykonując zadanie egzaminacyjne, uzyskuje inne rezultaty albo pożądane rezultaty uzyskuje w inny sposób niż uwzględniony w zasadach oceniania lub przedstawia nietypowe rozwiązanie, ale zgodnie ze sztuką w zawodzie, to nadal oceniaj zgodnie z kryteriami zawartymi w zasadach oceniania. Informacje o tym, że zasady oceniania nie przewidują zaistniałej sytuacji, przełącz niezwłocznie w formie pisemnej notatki do Przewodniczącego Zespołu Egzaminacyjnego z prośbą o przekazanie jej do Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej. Notatka może być sporządzona odręcznie w trybie roboczym.
- Informuj przewodniczącego zespołu nadzorującego o wszystkich nieprawidłowościach zaistniałych w trakcie egzaminu, w tym w szczególności o naruszeniach przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy i o podejrzeniach niesamodzielności w wykonaniu zadania przez zdającego.

Numer
stanowiska

Elementy podlegające ocenie/kryteria ocenyEgzaminator wpisuje **T**,
jeżeli zdający spełnił
kryterium albo **N**, jeżeli
nie spełnił**Rezultat 1. Karta mycia i dezynfekcji**

Wpisane w kolumnie:

1	A: Zestaw do cięcia cesarskiego, Zestaw do abrazji, Zestaw do pęcherza, Zestaw do przepukliny, Zestaw podstawowy do szycia, Zestaw wiertarka								
2	B: 1/782								
3	C: 90°C/5 min								
4	D: A ₀ = 3000								
5	E: Prawidłowy								
6	F: TAK								

Rezultat 2. Karta sterylizacji

Wpisane w kolumnie:

1	B: w wierszach Zestaw do cięcia cesarskiego, Zestaw do abrazji, Zestaw do pęcherza : 1/920								
2	B: w wierszach Zestaw do przepukliny, Zestaw podstawowy do szycia, Zestaw wiertarka: 2/821								
3	C: dla cyklu 1/920: 134°C/210,0 kPa/4 min								
4	C: dla cyklu 2/821: 134°C/210 kPa /18 min								
5	D: w wierszach Zestaw do cięcia cesarskiego, Zestaw do abrazji, Zestaw do pęcherza: Prawidłowy								
6	D: w wierszach Zestaw do przepukliny, Zestaw podstawowy do szycia, Zestaw wiertarka: Nieprawidłowy								
7	E: w wierszach Zestaw do cięcia cesarskiego, Zestaw do abrazji, Zestaw do pęcherza: TAK								
8	E: w wierszach Zestaw do przepukliny, Zestaw podstawowy do szycia, Zestaw wiertarka: NIE								

Numer
stanowiska

Rezultat 3: Protokół przekazania zestawów operacyjnych na Blok Operacyjny oraz Etykieta

Wpisane:

1	Protokół przekazania zestawów operacyjnych na Blok Operacyjny w wierszu Data: data egzaminu						
2	Protokół przekazania zestawów operacyjnych na Blok Operacyjny w kolumnie Nazwa zestawu: wyłącznie: Zestaw do cięcia cesarskiego, Zestaw do abrazji, Zestaw do pęcherza						
3	Etykieta w wierszu nazwa zestawu: Zestaw podstawowy do szycia						
4	Etykieta w wierszu data sterylizacji: data zgodna z datą egzaminu						
5	Etykieta w wierszu data ważności pakietu: data dłuższa o 3 tygodnie od daty egzaminu (+/- 2 dni)						

Numer stanowiska							

Przebieg 1. Wykonanie higienicznej dezynfekcji rąk techniką Ayliffe'a, kontroli czystości narzędzi, konserwacji narzędzi przegubowych oraz przygotowania pakietu z narzędziami

Zdający:

1	założył czepek ochronny, zakrywając nim wszystkie włosy, wykonał co najmniej pięciokrotnie 6 etapów dezynfekcji rąk zgodnie z techniką Ayliffe'a						
2	skompletował <i>Zestaw podstawowy do szycia składający się z narzędzi: nożyczki chirurgiczne - 1 szt., pęseta chirurgiczna - 1 szt., kleszczyki Pean - 1 szt., igłotrzymacz -1 szt.</i>						
3	przeprowadził przy użyciu lampy powiększającej wizualną kontrolę czystości wszystkich narzędzi, otwierając narzędzia i oglądając je z każdej strony						
4	przeprowadził konserwację narzędzi, naniósł preparat konserwujący w miejscach połączeń przegubów nożyczek, kleszczyków Pean, igłotrzymacza, rozprowadził środek konserwujący wykonując kilkukrotne ruchy zamykania i otwierania narzędzi						
5	zabezpieczył pakiet przed przerwaniem osłaniając ostrza nożyczek						
6	rozłożył na blacie stołu dwa arkusze papieru krepowanego: jeden biały oraz jeden zielony i umieścił na środku - po przekątnej tacę z <i>Zestawem podstawowym do szycia</i>						
7	umieścił w pakiecie wskaźnik chemiczny typu 4						
8	zapakował tacę narzędziową z <i>Zestawem podstawowym do szycia metodą skośną, zakleił pakiet wyłącznie taśmą ze wskaźnikiem sterylizacji parowej</i>						
9	zdezynfekował powierzchnię blatu stołu do pakowania narzędzi chusteczkami nasączonymi środkiem dezynfekcyjnym oraz uporządkował wszystkie materiały, z których korzystał podczas wykonywania pakowania						
10	zjął czepek i wyrzucił do pojemnika na odpady, wykonał higieniczną dezynfekcję rąk stosując technikę Ayliffe'a						

Egzaminator

imię i nazwisko

.....

data i czytelny podpis