

*Arkusze zawiera informacje prawnie  
chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu*

Układ graficzny © CKE 2016

**CKE** **CENTRALNA  
KOMISJA  
EGZAMINACYJNA**

Nazwa kwalifikacji: **Wykonywanie dezynfekcji i sterylizacji medycznej**

Oznaczenie kwalifikacji: **Z.20**

Numer zadania: **02**

Wypełnia zdający

Miejsce na naklejkę z numerem  
PESEL i z kodem ośrodka

Numer PESEL zdającego\*

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

**Z.20-02-16.05**

Czas trwania egzaminu: **120 minut**

## **EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE**

**Rok 2016**

### **CZEŚĆ PRAKTYCZNA**

#### **Instrukcja dla zdającego**

1. Na pierwszej stronie arkusza egzaminacyjnego wpisz w oznaczonym miejscu swój numer PESEL i naklej naklejkę z numerem PESEL i z kodem ośrodka.
2. Na KARCIE OCENY w oznaczonym miejscu przyklej naklejkę z numerem PESEL oraz wpisz:
  - swój numer PESEL\*,
  - oznaczenie kwalifikacji,
  - numer zadania,
  - numer stanowiska.
3. KARTĘ OCENY przekaz zespołowi nadzorującemu.
4. Sprawdź, czy arkusz egzaminacyjny zawiera 5 stron i nie zawiera błędów. Ewentualny brak stron lub inne usterki zgłoś przez podniesienie ręki przewodniczącemu zespołu nadzorującego.
5. Zapoznaj się z treścią zadania oraz stanowiskiem egzaminacyjnym. Masz na to 10 minut. Czas ten nie jest wliczany do czasu trwania egzaminu.
6. Czas rozpoczęcia i zakończenia pracy zapisze w widocznym miejscu przewodniczący zespołu nadzorującego.
7. Wykonaj samodzielnie zadanie egzaminacyjne. Przestrzegaj zasad bezpieczeństwa i organizacji pracy.
8. Jeżeli w zadaniu egzaminacyjnym występuje polecenie „zgłoś gotowość do oceny przez podniesienie ręki”, to zastosuj się do polecenia i poczekaj na decyzję przewodniczącego zespołu nadzorującego.
9. Po zakończeniu wykonania zadania pozostaw rezultaty oraz arkusz egzaminacyjny na swoim stanowisku lub w miejscu wskazanym przez przewodniczącego zespołu nadzorującego.
10. Po uzyskaniu zgody zespołu nadzorującego możesz opuścić salę/miejsce przeprowadzania egzaminu.

***Powodzenia!***

\* w przypadku braku numeru PESEL – seria i numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość

## Zadanie egzaminacyjne

Na podstawie Wykazu wyrobów medycznych dostarczonych do Centralnej Sterylizatorni zakwalifikuj wyroby medyczne do procesów kasacji, utylizacji oraz naprawy lub dezynfekcji i sterylizacji.

Wypełnij Kartę dezynfekcji i sterylizacji wyrobów medycznych.

Planując procesy dekontaminacji uwzględnij wyposażenie Centralnej Sterylizatorni, która nie posiada żadnego typu myjni-dezynfektora ani myjni ultradźwiękowej.

Z narzędzi chirurgicznych znajdujących się na stanowisku pakowania narzędzi skompletuj Zestaw kleszczy. Zestaw kleszczy umieść na tacy narzędziowej oraz zapakuj w papier krepowy techniką skośną.

Do przygotowania pakietu użyj wskaźników chemicznych klasy 1 oraz 5.

Wypełnij oraz wytnij Etykiętę zamieszczoną w arkuszu egzaminacyjnym.

Przyjmij datę egzaminu za datę sterylizacji oraz trzytygodniową datę ważności pakietu.

Etykiętę przyklej do pakietu za pomocą 2÷3 cm taśmy bez wskaźnika.

Uporządkuj stanowisko pracy.

Gotowość do wykonania pakietu zgłoś Przewodniczącemu ZN przez podniesienie ręki. Fartuchy operacyjne zapakuj w obecności egzaminatora na stanowisku wskazanym przez Przewodniczącego ZN.

Wykonany pakiet pozostaw w miejscu wskazanym przez Przewodniczącego ZN.

**Czas przeznaczony na wykonanie zadania wynosi 120 minut.**

**Ocenie podlegać będą 3 rezultaty:**

- Karta dezynfekcji i sterylizacji wyrobów medycznych,
- Etykieta,
- pakiet z Zestawem kleszczy

oraz

przebieg wykonania pakietu z Zestawem kleszczy.

### Wykaz wyrobów medycznych dostarczonych do Centralnej Sterylizatorni

Lp.	Nazwa i ilość wyrobów medycznych	Oddział	Uwagi
1	Kolonoskop - 1 szt.	Pracownia Endoskopii	Dezynfekcję wstępną oraz test szczelności endoskopu przeprowadzono w pracowni. W kolonoskopie stwierdzono nieszczelność.
2	Zestaw kleszczy	Blok Operacyjny	Skład Zestawu kleszczy: pean – 2 szt., kocher – 2 szt.
3	Kleszcze biopsyjne - 1 szt.	Pracownia Endoskopii	Dostarczone po użyciu. Oznaczone są przekreśloną cyfrą 2 w kółku.
4	Wiertarka ortopedyczna bez nasadek - 1 szt.	Blok Operacyjny	Sterylizacja parą wodną.
5	Kabel do stymulatora	Oddział Kardiologii	Nie zanurzać w płynach. Sterylizacja w temperaturze ≤60°C
6	Maska krtaniowa - 1 szt.	Blok Porodowy	Oznaczona jest przekreśloną liczbą 43 oraz napisem STEAM AUTOCLAVE ONLY. Udokumentowano do tej pory wykonanie 41 procesów dekontaminacji.
7	Fartuch operacyjny - 1 szt.	Blok Porodowy	Fartuch przeznaczony jest do wielorazowego użycia. Dostarczony po praniu dezynfekcyjnym. Fartuch ma odprute troki do wiązania.

**Karta dezynfekcji i sterylizacji wyrobów medycznych**

Lp.	Nazwa i ilość wyrobów medycznych	Oddział	Naprawa Tak/Nie*	Kasacja/utyliczacja		Metoda oraz technika dezynfekcji właściwej:**	Metoda sterylizacji
				Tak	Nie*		

\*\*Np.: manualna przez przecieranie.

\* Wpisz właściwe


Testy.info

\*\*Np.: manualna przez przecieranie.

\* Wpisz właściwe

**\*Etykieta**

Data sterylizacji pakietu	
Data ważności pakietu	
Zawartość pakietu	
Nazwa oddziału	
Podpis osoby pakującej	XXXXXXXXXXXX

**\* do wycięcia z arkusza egzaminacyjnego**

www.EgzaminZawodowy.info